

## Протокол для газожидкостного ухода или барофореза (введение препаратов без инъекций) с использованием средства «Мультифакторная косметика. Средство для укрепления и роста волос»

Использование аппаратов JetPeel является уникальным способом доставки полноценных белков (полипептидов) к живым клеткам кожи. «Средство для укрепления и роста волос» за счет таких белков как факторы роста и цитокины способствует восстановлению микроциркуляции кожи, запуску естественных процессов созревания клеток волосяного фолликула, активации процессов меланогенеза.

Для проведения процедуры понадобится:

- Шприц
- 5 мл физиологического раствора
- 1 флакон средства «Мультифакторная косметика. Средство для укрепления и роста волос» – «активные ингредиенты» (Средство) – лиофилизат факторов роста и цитокинов

### Пример протокола газожидкостного ухода JetPeel

1. Подготовьте кожу клиента к проникновению активных белков: помассируйте волосистую часть кожи головы с помощью аппарата JetPeel и физиологического раствора.
2. Возьмите из холодильника флакон Средства.
3. Аккуратно откройте флакон, не снимая алюминиевую часть крышки до конца. С помощью шприца переместите 5 мл физиологического раствора во флакон с активными компонентами.
4. Плавными движениями/покачиваниями перемешайте содержимое флакона. После полного растворения лиофилизата Средство готово к использованию.
5. Переместите Средство в шприц насадки аппарата. Соединив шприц и насадку можно приступать к процедуре.
6. Работайте, перемещаясь по коже головы «сканирующими» движениями. По возможности совершайте точечные остановки, осуществляя таким образом мягкое введение Средства.

Длительность процедуры: 10-15 минут

Количество средства на курс: 5-8 флаконов

Процедуру необходимо проводить 1 раз в неделю на протяжении 5-10 недель в зависимости от степени облысения.

Преимущества использования Средства для укрепления и роста волос:

- Не вызывает привыкания;
- Полипептиды (факторы роста и цитокины) в составе средства идентичны природным белкам человека, находятся в физиологических концентрациях, оказывают локальный эффект, не влияют на другие процессы в организме;
- Средства стерильны, отсутствуют консерванты, все концентрации компонентов проверены на цитотоксичность и безопасность;
- В отличие от PRP
  - Состав средства на 100% известен (и компоненты, и их концентрации), в связи с чем специалист может прогнозировать результат и получать желаемый эффект;
  - В составе нет провоспалительных цитокинов;
  - Факторы роста и цитокины в составе Средства активны и стабильны. Возможно длительное хранение.
  - Применение Средства рекомендовано лицам любой возрастной группы. Состав средства универсален, не зависит от индивидуальных особенностей организма, в отличие от смеси из плазмы крови.